

Zestaw LifeVac LV08 ratujący przy zadławieniach

<https://sklep.arpapol.pl/drobny-sprzet-medyczny/4602-zestaw-lifevac-lv01-ratujacy-przy-zadlawieniach.html>

Cena: **587,00 zł** brutto

587,00 zł za szt.

Nr referencyjny: **LV08**



Opis produktu

Zestaw LifeVac LV08 zawiera:

- walizka z uchwytem montażowym do ściany
- 1 urządzenie ssące LifeVac
- 2 maski duże (1 maska do testu)
- 1 maska średnia
- 1 maska mała
- instrukcja obsługi w języku polskim
- plakat formatu A5 z algorytmem postępowania wg producenta
- plakat formatu A3 z algorytmem postępowania wg producenta

Zestaw LifeVac LV08 ratujący życie przy zadławieniach:

- Zestaw zawiera 2 maski dla dorosłych oraz jedną małą dla dzieci (nie stosować u dzieci ważących mniej niż 10 kg).
- Nie trzeba posiadać specjalistycznej wiedzy i umiejętności, urządzenie obsługuje dziecko. Służy również do samopomocy.
- Urządzenie może być zastosowane u kobiet w ciąży, osób otyłych, osób starszych, osób z chorobami przewlekłymi i z dysfunkcją narządu ruchu, osób leżących, gdzie standardowa pierwsza pomoc w zadławieniach może być nie możliwa.
- Jest szybki i łatwy w użyciu, nastychmiast usuwa przeszkodę z dróg oddechowych.
- Żaden element urządzenia nie jest wprowadzany do organizmu, nie powoduje urazów - urządzenie jednokrotnego użytku.
- LifeVac jest nowatorskim urządzeniem ratującym życie osobom zadławionym, którego największą zaletą jest prostota w działaniu niewymagająca specjalistycznych szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Urządzenie ssące udrażniające drogi oddechowe zaprojektowano do użycia w 3 krokach - 3xP - przyłóż, przyciśnij, pociągnij.
- LifeVac obecny jest na rynkach na całym świecie, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Japonii oraz na terenie Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Szwecji, Grecji, a teraz także w Polsce. Zastosowanie LifeVac jest potwierdzone na dzień 10 maja 2019 roku 27 skutecznymi akcjami ratującymi ludzkie życie. Rocznie na terenie UE umiera ok. 5000 osób wskutek zadławienia w tym ok. 400 dzieci poniżej 14 roku życia.
- LifeVac to urządzenie ssące opracowane, by udrożnić drogi oddechowe u osoby, która się zadławiła, a pierwsza pomoc nie przyniosła efektu. LifeVac działa w kilka sekund - to sprawia, że urządzenie jest zarówno bezpieczne, jak i skuteczne.
- LifeVac to nieinwazyjne urządzenie, bezpieczne dla dziąseł, zębów, podniebienia i języka. Nie ma żadnego elementu, który musimy wprowadzić do jamy ustnej czy dróg oddechowych.
- LifeVac udrażnia drogi oddechowe poprzez wytworzenie siły ssącej.
- LifeVac jest wyposażony w specjalnie zaprojektowany, opatentowany zawór, który zasysa ciało obce w jednym kierunku. Zapobiega to przesunięciu

Pierwsza pomoc w **zadławieniach**

W przypadku zadławienia rozpocznij:

- 1 Zachęcaj osobę zadławioną do kaszlu
- 2 5 uderzeń w plecy w okolicie między łopatkami
- 3 5 ucisków okolicy nadbrzusza



Powtarzaj do momentu odkrztuszenia ciała obcego. Jeżeli poszkodowany straci przytomność, **wezwiij pomoc** (tel. **112, 999**). Następnie użyj urządzenia **LifeVac**.



Przyłóż maskę do twarzy obejmując usta i nos



Przyciśnij rączkę urządzenia w kierunku twarzy



Pociągnij za rączkę do siebie

Czynność powtarzaj do 5 razy. Jeżeli ciało obce nie zostało usunięte z dróg oddechowych, a poszkodowany jest nieprzytomny rozpocznij **Resuscytację Krążeniowo-Oddechową** (30 ucisków klatki piersiowej, 2 oddechy ratownicze).

Urządzenie LifeVac może być zastosowane u osoby zadławionej przytomnej, u której nie powiódł się pięciokrotnie standardowy protokół postępowania (**5 uderzeń między łopatki, 5 uciśnień nadbrzusza**). Powyższa instrukcja zalecana jest przez producenta.