



DR. WEIGERT
Higiena systemowa



MYCIE I DEZYNFEKCJA MANUALNA MASEK


1. PRZYGOTUJ POJEMNIK NR 1: woda + neoform K plus 1% (10ml /1l wody)



2. UMYJ dokładnie maskę

3. OPŁUCZ pod bieżącą wodą z sieci

4. PRZYGOTUJ POJEMNIK NR 2: woda + neoform K plus 1% (10ml/1l wody)

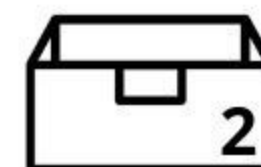

5. ZANURZ opłukaną maskę na 15 minut

6. OPŁUCZ pod bieżącą wodą z sieci

7. SUSZ w temperaturze maksymalnie 60oC, czas 30minut

Ilość Wody	10l	15l	20l	25l	30l	35l	40l
Stężenie 1%	100ml	150ml	200ml	250ml	300ml	350ml	400ml

fb Myj i żyj