

Aparat do płukania oczu 500ml zawieszany Tobin

<https://sklep.arpapol.pl/oczomyjki-tobin/4653-plyn-do-plukania-oka-500ml-tobin-eyewash-sklep-strazacki.html>

Cena: **74,52 zł** brutto

74,52 zł za szt.

Nr referencyjny: **ART/164**

Informacje

Każda butelka zawiera etykietę z informacjami i instrukcją w **języku polskim**



Opis produktu

Aparat do płukania oczu 500 ml Tobin z uchwytem mocującym.

Płyn do płukania oczu Tobin służy do wypłukiwania z oczu obcych cząstek i niebezpiecznych substancji. Jeżeli oczy były narażone na działanie kwasu lub zasady, należy użyć dodatkowych butelek i kontynuować płukanie przez minimum 15 minut. W razie potrzeby skontaktuj się z lekarzem.

Główne zalety:

1. **Usuwanie zanieczyszczeń:** Płyn do płukania oczu jest skutecznym sposobem na usunięcie zanieczyszczeń, takich jak kurz, pył czy chemikalia. Może to być szczególnie przydatne w przypadku, gdy w oko wpadnie jakiś obcy obiekt lub substancja.
2. **Bezpieczeństwo:** Płyn do płukania oczu jest bezpieczny w użyciu i nie powoduje dodatkowych podrażnień ani uszkodzeń oka. Dobrej jakości produkty do płukania oczu są starannie zbilansowane pod względem pH i zawierają składniki, które są bezpieczne dla delikatnej tkanki oka.
3. **Szybka pomoc w nagłych wypadkach:** Płyn do płukania oczu jest często stosowany jako pierwsza pomoc w przypadku nagłego zranienia oka lub kontaktu z niebezpiecznymi substancjami. Może być kluczowy w szybkim usunięciu drażniących czynników lub substancji chemicznych, zanim spowodują większe szkody.
4. **Łatwość użycia:** Płyn do płukania oczu jest dostępny w łatwych w użyciu opakowaniach, t. To sprawia, że jest łatwy do stosowania i może być używany przez każdego, nawet w przypadku samodzielnego leczenia.

Nie używać butelki po upływie terminu ważności. Nie używaj butelki, jeśli jest uszkodzona lub otwarta. Tylko do użytku zewnętrznego.

Zawartość 500 ml. Sterylny roztwór soli fizjologicznej 0,9%.

Rozmiar: 27 x 10,3 x 10 cm

Chemikalia są wyjątkowo niebezpieczne dla oczu. W przypadku jakiegokolwiek kontaktu należy rozpocząć płukanie w ciągu pierwszych sekund. Jeżeli nie ma możliwości zapewnienia, aby pierwsze stanowisko do płukania oczu znajdowało się w zasięgu ramion.

Czas ważności to 3 lata. Data przydatności do użycia znajduje się na każdej butelce. Każda butelka zapewnia etykietę z informacjami i instrukcją w języku polskim. Spełnia następujące Europejskie standardy SS-EN ISO 9002, SS-EN 46002, SS-EN 556i DIN 12930.

TOBIN⁺
Płyn do płukania oczu



500 ml

Płyn do płukania oczu 500 ml.

Instrukcja:

1. Przekręcić i zdjąć pokrywę.
2. Odwrócić butelkę do góry dnem i przekręcić dolną część o pełny obrót jednym wyraźnym ruchem lub do momentu, aż pojawi się przepływ płynu do przemywania oczu.
3. Trzymać butelkę w pozycji pionowej. Przepłukać oko.
W razie potrzeby użyj palców do przytrzymania otwartej powieki.



Zawartość 500 ml. Sterylny roztwór soli fizjologicznej 0,9%

Przechowywać w temperaturze 2-35°C

Przeznaczenie:

Płyn do płukania oczu Tobin służy do wypłukiwania z oczu obcych cząstek i niebezpiecznych substancji. Jeżeli oczy były narażone na działanie kwasu lub zasady, należy użyć dodatkowych butelek i kontynuować płukanie przez minimum 15 minut. W razie potrzeby skontaktuj się z lekarzem.

Nie używać butelki po upływie terminu ważności. Nie używaj butelki, jeśli jest uszkodzona lub już otwarta. Tylko do użytku zewnętrznego.



Tobin Sweden AB, Arntorpsgatan 26, Kungälv, Sweden

Phone: +46-300 758 50, e-mail: info@tobinSweden.se, www.tobinSweden.se

DYSTRYBUTOR
ARPAPOL

ul. Karmelkowa 29
52-437 Wrocław
tel. 71/ 725 55 69
www.arpapol.pl

2024-10 LOT 21-089